

寝たままでも飲める!



Kiss IIをつかうと...

- ◎ 少しずつ飲める
- ◎ たおれてもこぼれない
- ◎ 部品がひとつでセットしやすく洗やすい
- ◎ カバーをかぶせて清潔に持ち運び可能
- ◎ 寝たまま飲める
- ◎ 煮沸消毒 OK!

煮沸
消毒

薬液
消毒



市販の500ml以下のペットボトルにかぶせてご利用ください。



飲み口に指や物を入れないでください。破損の原因となります。



取付けかた

- ① 製品の下部を図のように折り返し、ボトルの口に製品を深く押し込みます。
- ② 本体のペロを持ち、①で折返した部分を元に戻します。



- ※ ペットボトルのキャップベースが隠れるようにしっかりとかぶせてください。取り付け後は、**▲▲▲**部を指でまんべんなく押さえ、浮きがないことをお確かめください。
- ※ ご使用になる前に、製品を取り付けたペットボトルを逆さにしてもれの無い事を確認してください。もれた場合は、再度セットしなおしてください。

いつでもどこでも手軽に
ピタッと閉じてさっと飲める **日本製**

Kiss II

こぼさず 少しずつ飲める



かむと開く
ノンドリップ構造で
さかさにしても
こぼれない!

特許
取得



子どもから高齢者まで使える
ユニバーサルデザイン



ドライブに オフィスで ベッドで

キャップについて

本体の飲み口部先端とキャップがあたらないようにセットしてください。



※強く押し込まないでください。先端部が折れ曲がると飲み口が開き、漏れの原因になります。

飲み口について

飲み口は水漏れを防ぐため微細な隙間できています。材質の特性上、密着力が高く、まれに飲み口が開きにくい場合があります。爪楊枝を飲み口の凹み中央部分にあて図のようにおさえて開いて下さい。



お手入れについて

- ・ 使用後は、すぐにぬるま湯につけよく洗浄してください。長時間放置したままですと果汁などの色や臭いが付着する場合があります。
- ・ 洗浄する時は、柔らかいスポンジと台所用洗剤できれいにあらってください。研磨剤入りのナイロンたわし、粒子の粗いクレンザーなどを使用するとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- ・ 本体とキャップをチェーンから取り外しそれぞれを洗浄してください。
- ・ 汚れが落ちにくい時は、台所用酸素系漂白剤を各漂白剤指定の濃度に薄めて使用してください。
- ・ 煮沸消毒をする時は、洗浄後たつぷりのお湯で2-3分位行ってください。また、薬液消毒をするときは、各消毒液の使用法に従って使用ください。
- ・ 過度の漂白、煮沸消毒、薬液消毒は製品を早く傷めますのでご注意ください。

警告 50℃以上の熱い飲み物は入れないでください。熱い飲み物が直接唇に触れたり、口に入り、やけどの原因になります。また、飲み物が漏れ、やけどやものを汚す原因になります。

ご使用上の注意

- ・ 炭酸飲料、果肉入りの飲料、お茶の葉入りの飲料、熱い飲料には使用しないでください。製品を取り付けた状態で長時間飲み物をそのままだけしないでください。また、高温の場所に放置したり、温めたりしないでください。
- ・ 製品をペットボトルに取り付けた状態でかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、万一の漏れを防ぐためにペットボトルを縦置きに入れてください。
- ・ 持ち運ぶ際は、必ずペットボトルを持って運んでください。製品に紐などを通しづらさげて携帯したり、また、製品を振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の原因になります。
- ・ 古くなると弾力性がなくなり破れやすくなります。
- ・ 小さな部品があります。誤って飲み込む恐れがありますので、必ずセットしてご使用ください。
- ・ 500ml以下のペットボトルにご利用ください。やわらかいタイプのペットボトルは、使用中にペットボトルが破損する恐れ、飲み物が漏れる恐れがあるためご使用をお避け下さい。
- ・ ペットボトルの種類によって取り付けられないものもあります。又金属製のボトルには使用しないでください。破損の原因になります。
- ・ ペットボトルを強く握ると大量に飲料が出たり、漏れの原因となりますのでご注意ください。
- ・ 製品の性質上、小さな傷がもとで製品が破れたり裂けたりすることがあります。また、強い力でかんだり、製品を無理に伸ばしたり、飲み口を無理に開いたり、飲み口に指や物を入れたりしないでください。破損の原因になります。

本製品は消耗品です。1年を目安に、キズ、破損、表面のザラツキをご確認ください。安全にご使用いただくため、該当する場合は使用を中止してください。

- ※パッケージに使用している文章・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。
- ※廃棄の際は、お住まいの各自自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

AK02C ペットボトル用 キャップ付

部品名	材質	耐熱温度
本体	シリコンゴム	-30℃～200℃
キャップ	ポリプロピレン	-20℃～120℃
チェーン	真鍮	

取扱上の注意：火のそばに置かないでください。

特許取得済 日本製

製品の品質に万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

ご使用前に必ずよくお読みの上正しくお使いください。いつでも見られる場所に大切に保管してください。



<http://www.nocilis.jp/>

製造・販売元 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所
〒570-0021大阪府守口市八雲東町2-82-21-705 / TEL: 06(6909)5095(代) 受付: 平日 10:00~12:00/13:00~17:00